


# UPUTE ZA MONTAŽU CLINIC V RUKOHVAT 90' ZID-POD 750x750

NAVODILA ZA MONTAŽO CLINIC V DRŽALO ZA ROKE 90' stena-tla 750x750  
WALL TO FLOOR GRAB BAR ASSEMBLY INSTRUCTIONS

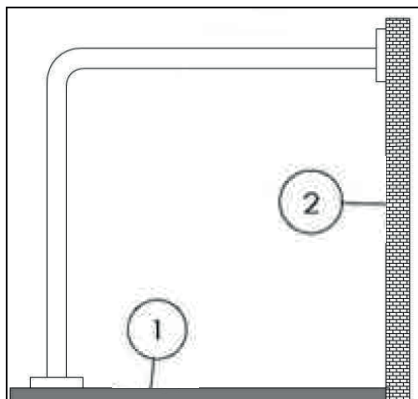

1	HRV	POD
	SLO	TLA
	ENG	FLOOR
2	HRV	ZID
	SLO	STENA
	ENG	WALL

- HRV** U pakiranju se nalaze četiri vijka za montažu i četiri plastična uloška.  
(Po dva komada za svaku stranu)
- SLO** Paket vključuje štiri pritrdilne vijake in štiri plastične vložke. (Dva kosa za vsako stran)
- ENG** There are four pcs stainless screws and four pcs dowels in the assembly set.  
(For 2 pieces right side and for 2 pieces left side)
- HRV** Montažu rukohvata vršite isključivo na čvrstom zidu i podu.
- SLO** Držalo za roke montirajte samo na trdno steno.
- ENG** Make sure the wall and floor are solid first.
- HRV** Rukohvat na sebi ima pripremljene rupe za montažu.
- SLO** Na držalu za roke so pripravljene pritrdilne luknje.
- ENG** This product has holes on both sides.
- HRV** Na zidu i podu označite pozicijske rupe za montažu.
- SLO** Označite luknje za namestitev na steno.
- ENG** Put in the on wall and floor. Then mark the places of the holes on the wall and floor.
- HRV** Izbušite rupu na zidu odgovarajuće veličine.
- SLO** V steno izvrtajte luknjo ustrezne velikosti.
- ENG** Then drill the marks appropriate diameter.
- HRV** Postavite zidne uloške u rupu.
- SLO** V luknjo namestite stenske vložke.
- ENG** Place dowels in drilled places.
- HRV** Pričvrstite rukohvat na zid sa priloženim vijcima.
- SLO** Držalo za roke pritrdite na steno s priloženimi vijaki.
- ENG** Then fix the product on the wall with screws.